


INSTRUCTIEKAART NIV




PRISMA VENT 50C

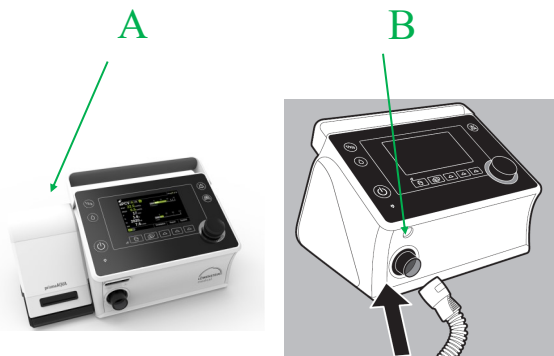

Opbouw systeem

Voordat u start met de beademing :

- Vult u het waterbakje voor de luchtbevochtiging met schoon kraanwater (als u die gebruikt). (A)
- Sluit u de beademingsslang aan. (B)

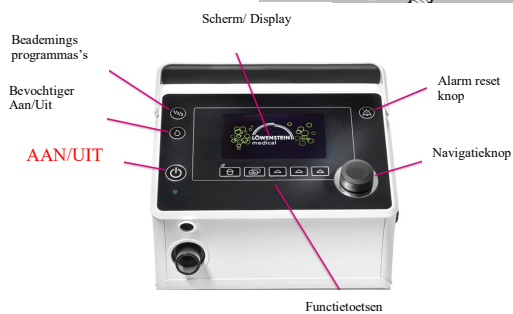

Starten/ stoppen van beademingstherapie

Starten beademingstherapie:

Als het display donker is, druk op de **AAN/UIT** toets.

Of:

Als de functie Autostart aanstaat: in de beademingsslang blazen. Het apparaat zal dan starten.

Stoppen beademingstherapie:

Druk op de **AAN/UIT** knop en druk deze in totdat het scherm "therapie beëindigen" uit beeld verdwijnt. Het apparaat is nu gestopt. Het scherm gaat na 5 minuten uit en het apparaat schakelt terug naar de stand-by stand.

Bevochtigingstoets (1) Bevochtigingssymbool (2)



Navigatieknop (3)


Luchtbevochtiging

Om de luchtbevochtiger te starten, de bevochtigingstoets kort indrukken. (1)

Als de bevochtiging actief is gaat de verlichting in de bevochtigingstoets uit! Het bevochtigingssymbool in het display gaat branden. (2)

Om de bevochtigungsstand aan te passen, drukt u de bevochtigingstoets lang in. Er komt een menu. Met de navigatieknop (3) kunt u de stand naar eigen wens instellen. U bevestigt de keuze door één keer op de navigatieknop te drukken. Keer terug naar het beginscherm door op de hometoets te drukken.

Bij het hervatten van de therapie zal het toestel altijd met de laatste instellingen starten.

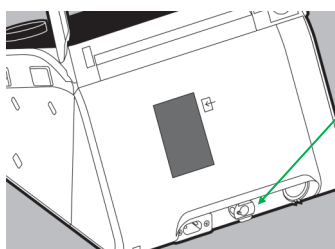


Zuurstof nippel

Aansluiten zuurstof (O2)

Indien u gebruik maakt van zuurstof sluit u die aan op de zuurstof nippel (zie foto).


Bij het **stoppen** van de beademing stopt u eerst de **zuurstof** en daarna, na enkele seconden, het **beademingsapparaat**. Zo voorkomt u dat er zuurstof ophoopt in het apparaat.

PRISMA VENT 50C

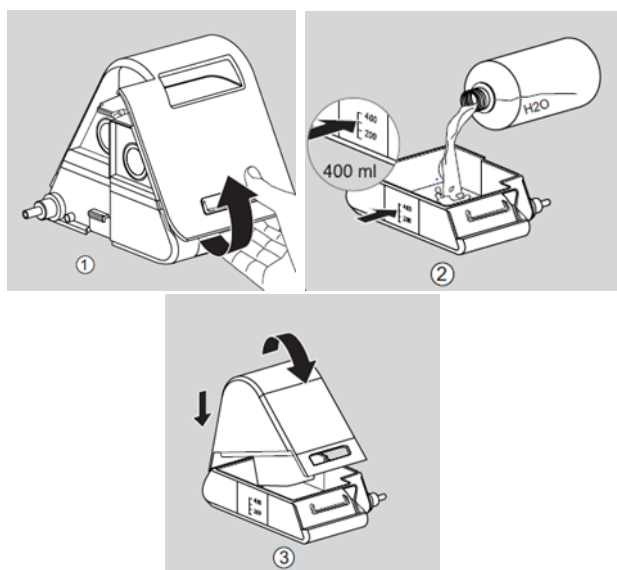

Bevochtigings reservoir vullen

- Koppel de bevochtiger los van het toestel door op de achterzijde op de vierkante knop te drukken en tegelijkertijd het reservoir van het apparaat los te trekken.
- Open de klep aan de achterkant (1)
- Vul het waterbakje met maximaal 400 ml tot aan de aangegeven streep (2)
- Sluit het gevulde waterbakje weer (3)
- Plaats de gevulde bevochtiger weer terug op het beademingsapparaat

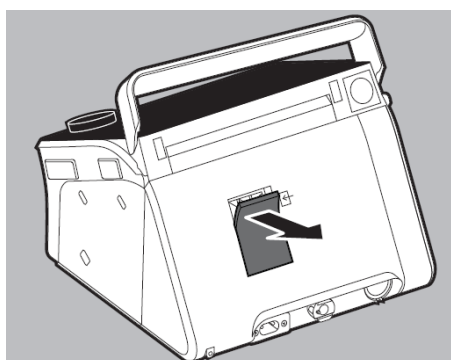

Onderhoud

Iedere dag:


- Waterreservoir schoonspoelen beademings slang “luchten” .

Iedere week:

- Maak het luchtfilter schoon door deze uit te spoelen en droog terug te plaatsen. (zie foto). Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek.

Ieder half jaar:

- Vervang het grijze luchtfilter.
- Vervang de beademings slang.

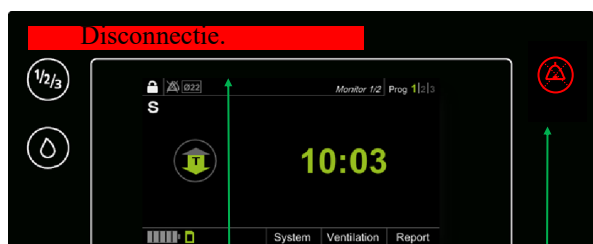

Alarmen

Als het alarmsignaal afgaat

Als u een alarm hoort, staat in het scherm in rode kleur te lezen wat er aan de hand is
Dat kan bijvoorbeeld zijn:

- De beademings slang is los gegaan van het masker of van het koppelingsstuk op het apparaat.
- Het masker sluit niet goed aan op uw gezicht, waardoor teveel lucht weglekt.

Bij deze problemen hoort u een alarm. U leest dan in het scherm de melding “disconnectie” (B).
U zet het alarm voor 2 minuten uit door kort op de alarmbel/ resettoets te drukken. (A)
De alarmbel/ resettoets (A) zal blijven knipperen totdat de storing verholpen is. Als u de storing binnen 2 minuten niet oplost gaat het alarm weer af.

- Technische storingen dient u direct te melden bij de onderhoudsfirm. Voor het telefoonnummer, zie de sticker op het apparaat. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar.