



INSTRUCTIEKAART

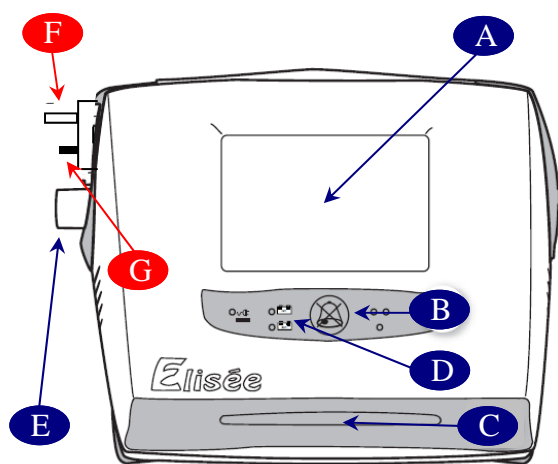



Beschrijving/bediening

- (A) Touch screen/display
- (B) Alarmonderdrukfunctie
- (C) Handgreep
- (D) Stroomvoorziening
- (E) Aansluiting Beademings slang
- (F) Aansluiting expiratieklep
- (G) aansluiting drukslang

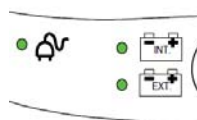

Zie (D):

- Lichtindicator voor netspanning
- Lichtindicator gebruik interne accu.
- Lichtindicator gebruik externe accu.

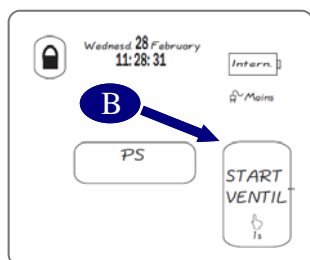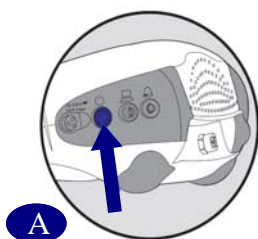



Starten Elisee-150

- (A) Druk op de AAN/UIT schakelaar aan rechter zijkant
Zie foto (A).
- (B) Start de beademing door gedurende een seconde op "START VENTIL" te drukken in het touch screen.

Alarmfuncties


Bij de gemaakte beademingsinstellingen zijn ook alarmgrenzen ingesteld. Alarmfuncties worden geactiveerd indien de (minimale/maximale) grenzen worden overschreden.

- (A) Alarmoorzaak wordt hier weergegeven
- (B) Alarmindicator licht rood op en geeft een akoestisch signaal. Door op deze knop te drukken wordt het alarm gedurende 2 minuten onderdrukt. *U dient dan wel de oorzaak van het in (A) getoonde alarm te achterhalen en op te lossen*, anders zal het apparaat na 2 minuten wederom alarmeren.

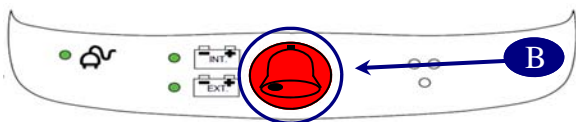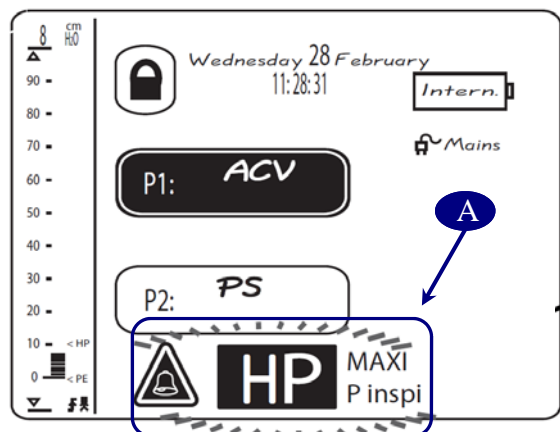



De meest voorkomende alarmen zijn:

- Mini VT** :het teugvolume is lager dan de ingestelde grens.
- Maxi VT** :het teugvolume is groter dan de ingestelde grens.
- LP** :lage druk alarm wanneer er sprake is van een open circuit
- HP** :hoge druk alarm , kan wijzen op sputum, dichtslib ben binnencanule of vocht in de druklijn.

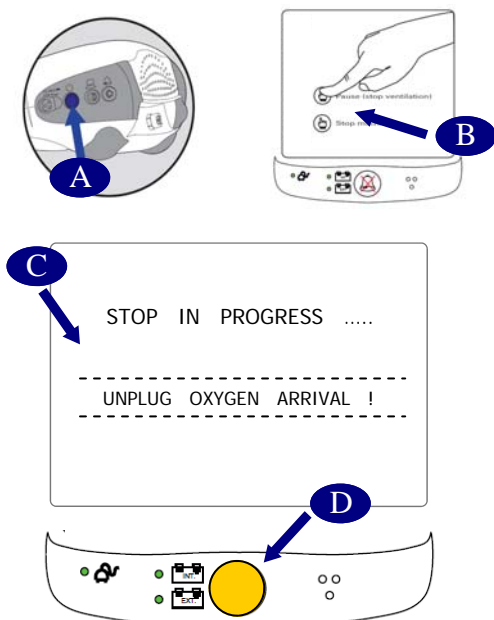

Uitschakelen Elisee

- (A) Druk op de AAN/UIT schakelaar
- (B) U kunt nu kiezen uit: beademing pauzeren (gaat naar stand-by) modus, of beademing stoppen. Wij adviseren “pauzeren”.
- (C) Indien u voor “STOPPEN” gekozen heeft, zal het volgende scherm zichtbaar worden. De machine stopt, maar blaast nog enkele seconden de resterende lucht uit. Indien u **ZUURSTOF** gebruikt, koppel deze **NU** los van uw apparaat.
- (D) De alarminicator licht geel op, wordt vervolgens rood een geeft een akoestisch alarm. Druk nu eenmaal op knop (D) en de machine stopt.

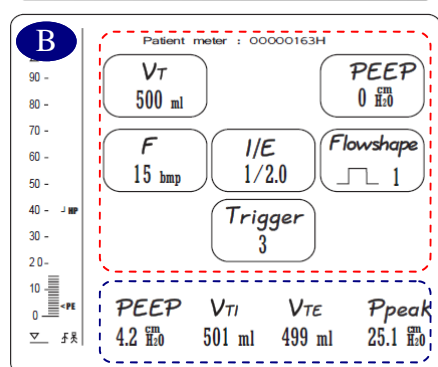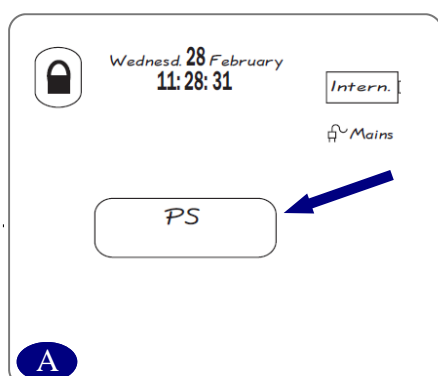

Display informatie

- Fig. (A): Druk (IN BEDRIJFSMODUS) op de hiernaast afgebeelde toets.
- Fig. (B): Nadat u bovenstaande gedaan heeft krijgt u het volgende scherm te zien.

De **rood** omkaderde getallen zijn de instellingen die voor u door het CTbM zijn ingesteld. Deze instellingen staan vast. Alleen het CTbM kunnen deze veranderen.

De **blauw** omkaderde getallen zijn de gemeten waarden op dit moment. Deze waarden kunnen per ademteug verschillen. Het CTbM kan u hiernaar vragen indien zich in de thuissituatie problemen/alarmen voordoen.

Onderhoud

- Dagelijks actieve bevochtigingspot ledigen, schoonmaken en vullen met schoon water (afgekookt).
- Water dagelijks afkoken, niet bewaren in koelkast.
- Stoffilter 1 x per week verschoonen