


INSTRUCTIEKAART N I V



RESPIRONICS A - 40 PRO

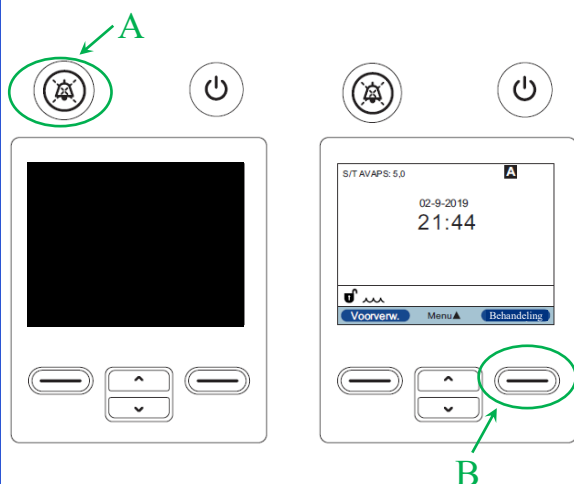

Starten beademing


Voordat u start met de beademing dient u te zorgen dat :

- De watertank gevuld is (indien deze in gebruik is).
- De beademingsslang aangesloten is.

Starten beademing:

Standaard ziet u een zwart scherm, door op knop (A) te drukken zal het hiernaast afgebeeld opstartscherm weergegeven worden.

Om vervolgens de beademing te starten drukt u op knop (B).

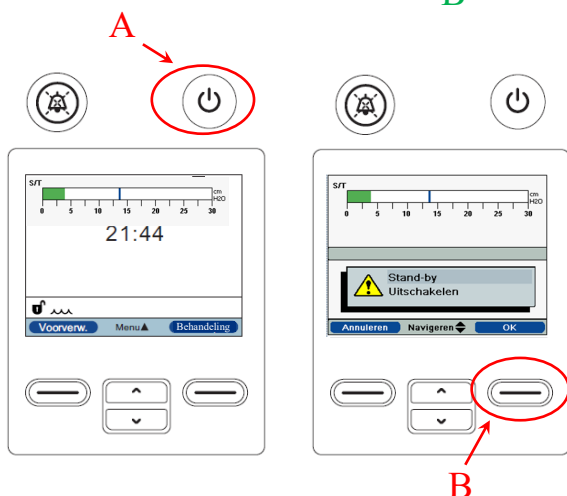


Stoppen van beademingstherapie

Stoppen beademing:

Druk op knop (A) (als het apparaat in werking is), vervolgens wordt de hiernaast getoonde afbeelding weergegeven. Door op knop (B) te drukken zal het apparaat in de Stand-By modus gaan.


Koppel uw beademingsslang af en laat deze drogen. Maak uw bevochtigingsbakje leeg en laat deze idem drogen.

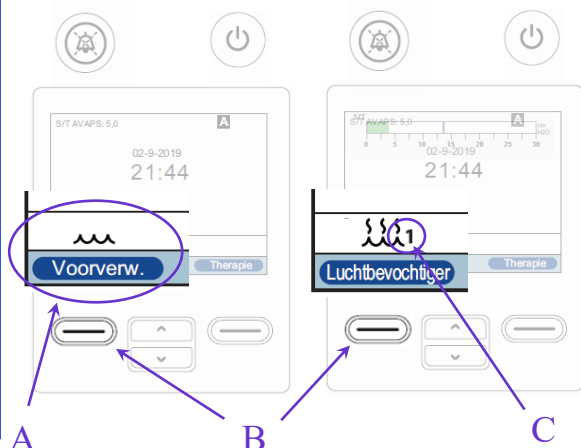

Luchtbevochtiging

Indien u de luchtbevochtigingsmodule aansluit aan het beademingsapparaat, verschijnt het icoontje getoond bij (A).


- Indien u het water wenst voor te verwarmen dient u in de **STAND-BY** modus op knop (B) te drukken.
- Indien u de luchtbevochtiger in wilt stellen dient het beademingsapparaat **AAN** te staan. Door op toets (B) te drukken is deze instelbaar van 0 (= uit) tot 5 (hoogste stand). Deze wordt weergegeven bij (C).
- De laatste instelling wordt vastgehouden indien het apparaat weer in **STAND-BY** gezet wordt.

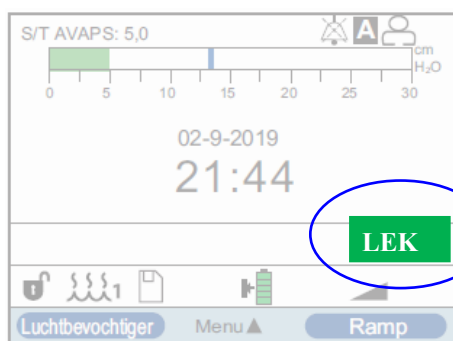

Masker lekkage indicator

In het display wordt de lekstatus aangegeven van uw masker (A). Hiermee wordt de lekkage bedoeld die niet wenselijk is.

- Uw masker zit prima !
- Matige lekkage langs uw masker. (Masker aandacht vereist)
- Grote Lekkage langs uw masker. (Masker opnieuw aanbrengen)

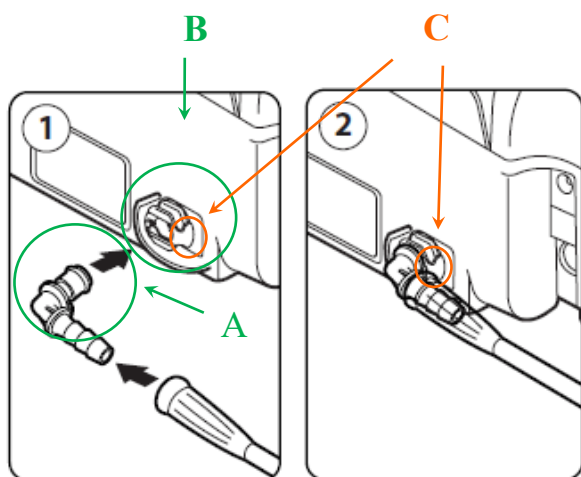

Zuurstof aansluiten (optioneel)

Waarschuwing: gebruik geen zuurstof bij open vuur! Dit kan mogelijk brand of een explosie veroorzaken.

1. Sluit de zuurstofslang van de zuurstofbron (zuurstoffles, zuurstofconcentrator of andere bron) aan op de zuurstofadapter (A).
2. Sluit de zuurstofadapter adapter aan op de zuurstof-inlaatpoort (B) van het beademingsapparaat. Deze bevindt zich aan de achterzijde. Duw de adapter in de opening, u hoort een "klik".
3. Duw, om de zuurstofconnector los te koppelen, de metalen schuif (C) in om deze uit te werpen en trek de connector los.

Onderhoud

Iedere dag:



- Waterreservoir schoonspoelen beademingsslang "luchten".

Iedere week:

- Maak het luchtfilter schoon door deze uit te spoelen en droog terug te plaatsen. (zie foto). Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek.

Ieder half jaar:

- Vervang het grijze luchtfilter.
- Vervang de beademingsslang.

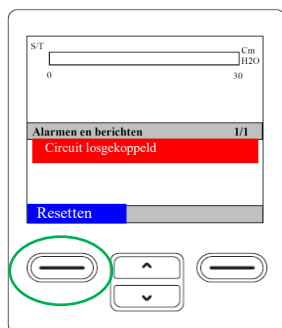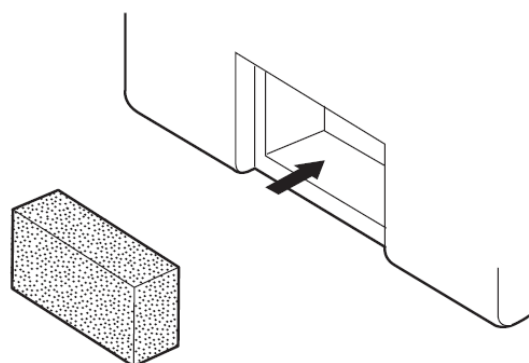

- Technische storingen dient u direct te melden bij de onderhoudsfirma. Het telefoonnummer is **043-3876548**. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Alarmen

In nagenoeg alle gevallen zal op uw apparaat enkel het alarm: **"Circuit losgekoppeld"** getoond worden in het scherm.

De reden hiervan is:

- De slang is losgeschoten
- Het masker zit te los en lekt te veel lucht.

Het hiernaast getoonde scherm zal oplichten en tevens zal de alarm-resetknop (A), rood gaan "flikkeren".

Door op knop (A) te drukken zal het akoestische alarm 2 minuten onderdrukt worden. De melding zal in het scherm blijven staan.

Door op knop (B) te drukken zal de alarmmelding verdwijnen uit het scherm. U dient echter wel de oorzaak te verhelpen anders zal de alarmmelding zich herhalen.