



INSTRUCTIEKAART - NIV !

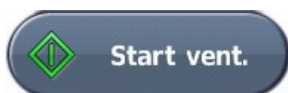

ASTRAL 150 — RESMED

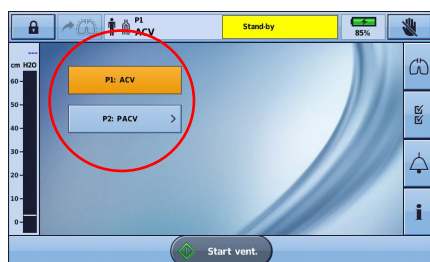

introductie

Beschrijving:

2. Inademingspoort (naar patiënt), Aansluiting voor de beademingsslang.
4. Ethernet-connector (alleen voor onderhoud)
5. USB-connector (voor downloaden gegevens)
6. Mini-USB-connector (alleen voor onderhoud)
7. DC-ingang voor stroomadapter
8. **Aan/uit-drukknop van het apparaat**
9. Connector voor SpO2-sensor
10. Vijf-pinsconnector voor afstandsalarm
11. Zuurstofinlaat voor lage flow (maximaal 30 l/min)
12. Luchtinlaat (compleet met hypoallergeen filter)

Beademing Starten en Stoppen

Indien er meerdere modi ingesteld zijn (zie *omcirkeling*) drukt u op de gewenste modus alvorens te starten, en bevestigt deze. (U kunt ook tijdens een in werking zijnde modus wisselen van modus).

De ventilatie starten:

1. Druk op de groene aan/uit-knop aan de achterzijde van het apparaat (als het apparaat nog niet is ingeschakeld).
2. Druk op de knop afgebeeld hiernaast. De ventilatie wordt gestart.
3. Koppel zo nodig de zuurstof aan.

De ventilatie stoppen:

- De ventilatie kan op elk moment en vanuit elk scherm worden gestopt.
1. Als zuurstof is aangesloten, schakelt u de zuurstoftoediening uit.
 2. Druk op de hiernaast afgebeelde knop en houd deze knop ingedrukt.


ASTRAL 150 RESMED NIV



Opbouw systeem


1. Sluit de luchtslang aan op de inademenspoort van het apparaat.
2. Sluit de (optionele) bevochtiger aan
3. Sluit het masker aan.

Menubalk Patiënten menu

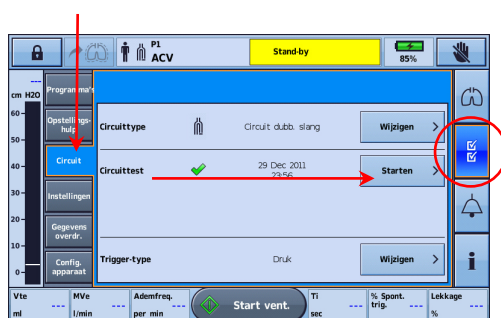

- Circuittest/slangentest:

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op de aangegeven knop in het submenu. Druk op “starten” bij circuit-test en volg de instructies. *(Alleen mogelijk indien de ventilatie gestopt is!)*

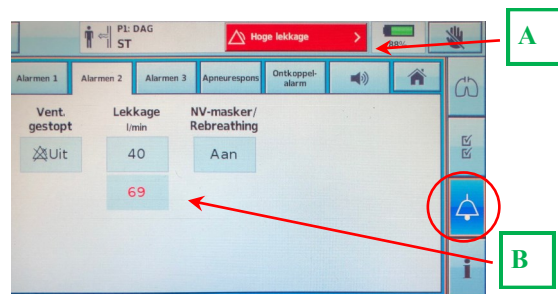

- Alarmeren:

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op het tabblad “Alarmeren 2”. Het meest voorkomende alarm is het “Hoge lekkage” alarm. Er zal een alarmmelding zichtbaar zijn boven in het scherm. (A) Dit alarm ontstaat wanneer het masker niet goed aansluit op het gezicht of dat de slang losgeschoten is. De gemeten lekkage zal rood kleuren omdat de alarmgrens overschreden is. (B)



- Alarmhistorie

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op de aangegeven knop in het submenu. De alarmhistorie wordt weergegeven.

Gebeurtenissen: hier worden alle in het logboek vastgelegde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, weergegeven.

- Alarm silence knop


Indien de getoonde (oranje) knop  ingedrukt wordt zal er gedurende 2 min. geen akoestisch alarm volgen. De knop zal knipperen.

Het icoontje hiernaast wordt afgebeeld in de menubalk 

- Het weergegeven actieve alarm resetten:


1. Druk op  om het alarm te onderdrukken. De knop brandt en knippert.
2. Druk nogmaals op om het alarm te resetten. Het alarmbericht wordt uit het alarm vak verwijderd. Het wordt ook van het scherm Actieve alarmen gewist.

Zuurstof toevoegen aan de Astral - 150

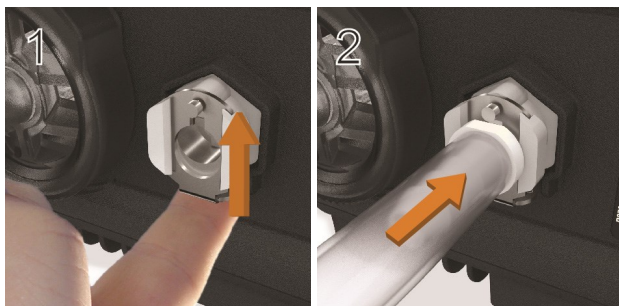

- Zuurstof toevoegen

1. Ontgrendel de zuurstofinlaat voor lage flow aan de achterzijde van het apparaat door de vergrendelklem omhoog te duwen.
2. Steek het ene uiteinde van de zuurstoftoevoerslang in de zuurstofconnectorpoort. De slang wordt automatisch vergrendeld.
3. Sluit het andere uiteinde van de zuurstoftoevoerslang op de zuurstoftoevoer aan.
4. Start de ventilatie.
5. Zet de zuurstof aan en stel deze op de gewenste flowsnelheid of het FiO₂-niveau in.

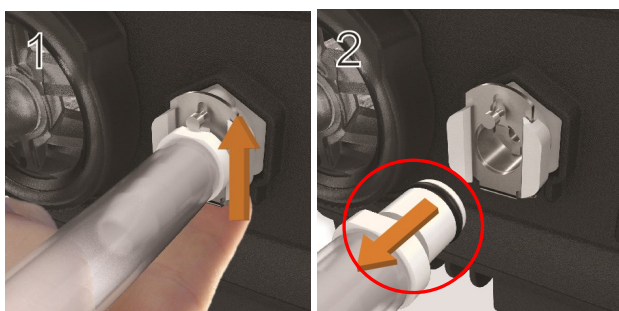

- Zuurstof afkoppelen

1. Ontgrendel de zuurstofinlaat voor lage flow aan de achterzijde van het apparaat door de vergrendelklem omhoog te duwen.
2. Verwijder de zuurstoftoevoerslang uit de zuurstofconnectorpoort.

PS: Om zuurstof toe te voegen heeft u een speciale koppelstuk nodig die verkrijgbaar is via CTBM (rood omcirkeld).

Luchtfilter vervangen



1. Ontgrendel het luchtfilterdeksel door het linksom te draaien.
2. Trek het luchtfilterdeksel van het apparaat.
3. Trek het luchtfilter van het deksel en werp het filter weg.
4. Steek een nieuw filter in het deksel.
5. Plaats het luchtfilter en het deksel weer in het apparaat.
6. Draai het deksel rechtsom om ze op hun plaats vast te zetten.

Technisch en huishoudelijk Onderhoud

- In geval van een technische storing dient u contact op te nemen met de leverancier van het toestel. (Zie firma sticker aan de zijkant van het toestel).
- Maak wekelijks met een vochtige doek het apparaat schoon.
- Vervang 1 x per kwartaal het luchtfilter
- Vervang eenmaal per vier maanden de slangenset en doe een nieuwe circuittest/ slangentest.